

## RTA E.Z. NEELSEN BOYAMA SETİ (250 ml)

RTA E.Z. Neelsen Boyama Seti aside dirençli bakterilerin mikroskopik incelemelerinin yapılmasında kullanılır.

### SET İÇERİĞİ:

- EZN Karbol Fuksin Çözeltisi (1x250 ml)
- EZN Metilen Mavisi Çözeltisi (1x250 ml)
- Asit-Alkol Çözeltisi (2x250 ml)

### TEHLİKE VE UYARILAR:

- Karbol Fuksin Çözeltisi zararlı ve yanıcıdır.
- Metilen Mavisi Çözeltisi yanıcıdır.
- Asit Alkol Çözeltisi kolay alevlenir ve tahriş edicidir.



### BOYAMA TEKNİĞİ

- 1- Preparatı EZN Karbol Fuksin Çözeltisi ile kaplayın.
- 2- Alttan çıplak alevle buhar çıkacak şekilde 2-3 dakika kadar ısıtın.
- 3- Preparatı distile suyla yıkayın.
- 4- Preparatı Asit-Alkol Çözeltisi ile yıkayın.
- 5- Distile suyla 15 saniye yıkayın.
- 6- Preparata EZN Metilen Mavisi Çözeltisi ekleyin. 1 dakika sonra lamı silkeleyerek ayırıcı uzaklaştırın.
- 7- Preparatı havada kurutun. Mikroskopta inceleyin.

### SONUÇ:

Aside dirençli mikro organizmalar, mavi-yeşil bir zemin üzerinde kırmızı renkte görüntülenir.

RTA.KK.110 Revizyon Tarihi/Revizyon no:-/0